

SÅDAN FÅR DU SVAR

Vi sender dig en email eller sms, når svaret på din test er klar. Her modtager du en personlig kode, som du kan bruge til at finde dit svar på www.klamydiahjemmetest.dk.


Vi kontakter dig kun, når dit testsvar er klar.

Du kan også læse dit svar på www.sundhed.dk via selvbetjeningen.

HJEMMETEST

VEJLEDNING TIL URINTEST FOR KLAMYDIA OG GONORÉ

SÅDAN SENDER DU TESTEN

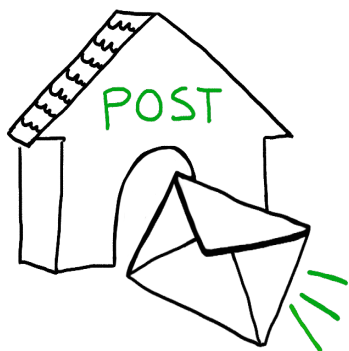

TRIN 5


Send kuverten som post samme dag som prøven er taget.

Send den på posthus via PostNord. Find dit nærmeste posthus på www.postnord.dk

VIGTIGT

- Testen virker først to uger efter, du har haft ubeskyttet sex. Vent derfor til de to uger er gået, inden du tager testen.
- Testen har en begrænset holdbarhed. Tag den derfor hurtigst muligt.
- Gå til lægen, hvis du er bekymret for, at du kan være smittet med andre seksygdomme end klamydia/gonorré.

SÅDAN TAGER DU TESTEN

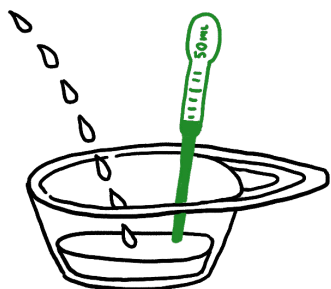

TRIN 1

Du skal tisse i et bæger/kop – brug morgenurin eller vent med at tisse i koppen til efter to timer siden din sidste vandladning

Brug den vedlagte pipette til at sugе urinen op. Du skal bruge mellem 10-50 ml.



TRIN 2

Sku låget af det lille vedlagte glas, og hæld ikke væsken i glasset ud. Hæld derefter urinen fra pipetten ned i glasset.

Fyld kun op til den øverste sorte streg.

Skru låget godt fast.

SÅDAN PAKKER DU TESTEN



TRIN 3

Udfyld prøvesedlens felter med dit personnummer, dit navn og dato for prøvetagning.

Tag et af de fire klistermærker med strejkode af fra den vedlagte prøveseddel. Det sidder i nederste højre hjørne af sedlen.

Placér klistermærket lodret på prøveglasset.



TRIN 4

Læg prøveglasset og prøvesedlen ned i den hvide kuvert.

Se bagsiden for at læse, hvordan du sender kuverten.