

SÅDAN FÅR DU SVAR


Vi sender dig en email eller sms, når svaret på din test er klar. Her modtager du en personlig kode, som du kan bruge til at finde dit svar på www.klamydiahjemmetest.dk.

Vi kontakter dig kun, når dit testsvar er klar.

HJEMMETEST

VEJLEDNING TIL **SKEDETEST** FOR KLAMYDIA OG GONORÉ

SÅDAN SENDER DU TESTEN

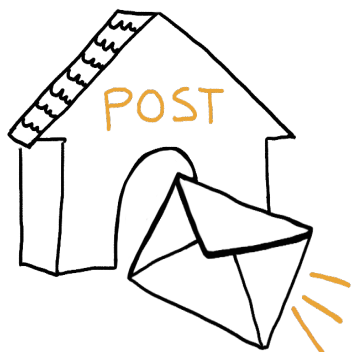

TRIN 5


Send kuverten som post samme dag som prøven er taget.

Send den på posthus via PostNord. Find dit nærmeste posthus på www.postnord.dk

VIGTIGT


- Testen virker først to uger efter, du har haft ubeskyttet sex. Vent derfor til de to uger er gået, inden du tager testen.
- Testen har en begrænset holdbarhed. Tag den derfor hurtigst muligt.
- Gå til lægen, hvis du er bekymret for, at du kan være smittet med andre seksygdomme end klamydia/gonorré.

SÅDAN TAGER DU TESTEN

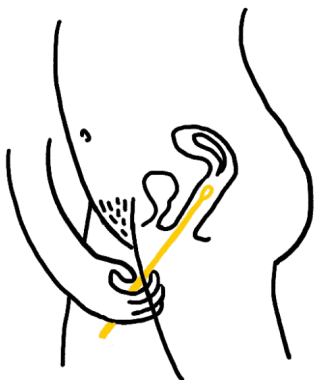

TRIN 1

Du skal indføre vatpinden ca. 5 cm. op i din skede. Drej vatpinden rundt i 10-30 sekunder. Det er vigtigt, at du holder midt på vatpinden.

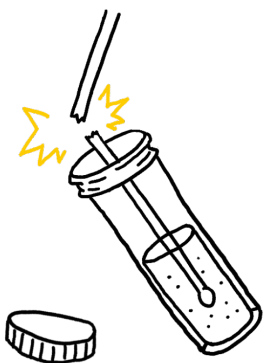


TRIN 2

Skru låget af det lille vedlagte glas, og hæld ikke væsken i glasset ud.

Stik prøveenden af vatpinden ned i det lille vedlagte glas og knæk forsigtigt den øverste del af vatpinden af. Smid denne del ud.

Skru derefter låget fast på prøveglasset.

SÅDAN PAKKER DU TESTEN

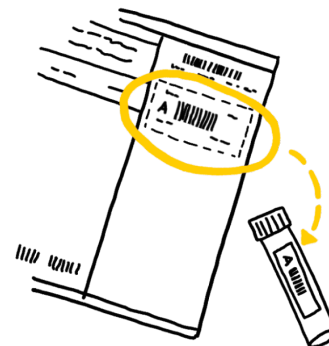

TRIN 3

Udfyld prøvesedlens felter med dit personnummer, dit navn og dato for prøvetagning.

Tag et af de fire klistermærker med stregkode af fra den vedlagte prøveseddel. Det sidder i nederste højre hjørne af sedlen.

Placér klistermærket lodret på prøveglasset.



TRIN 4

Læg prøveglasset med vatpinden og prøvesedlen ned i den hvide kuvert.

Se bagsiden for at læse, hvordan du sender kuverten.